



川鳶式

局所持続洗浄用チューブセット

届出番号13B1X00264170002

化膿性骨髄炎・関節炎および 広範囲軟部組織膿瘍の治療に 画期的効果!!

洗浄中の閉塞を解除する特殊回路をもち、
液漏れを防止し、洗浄を持続させます。

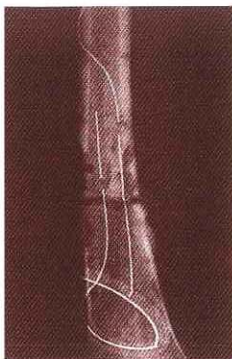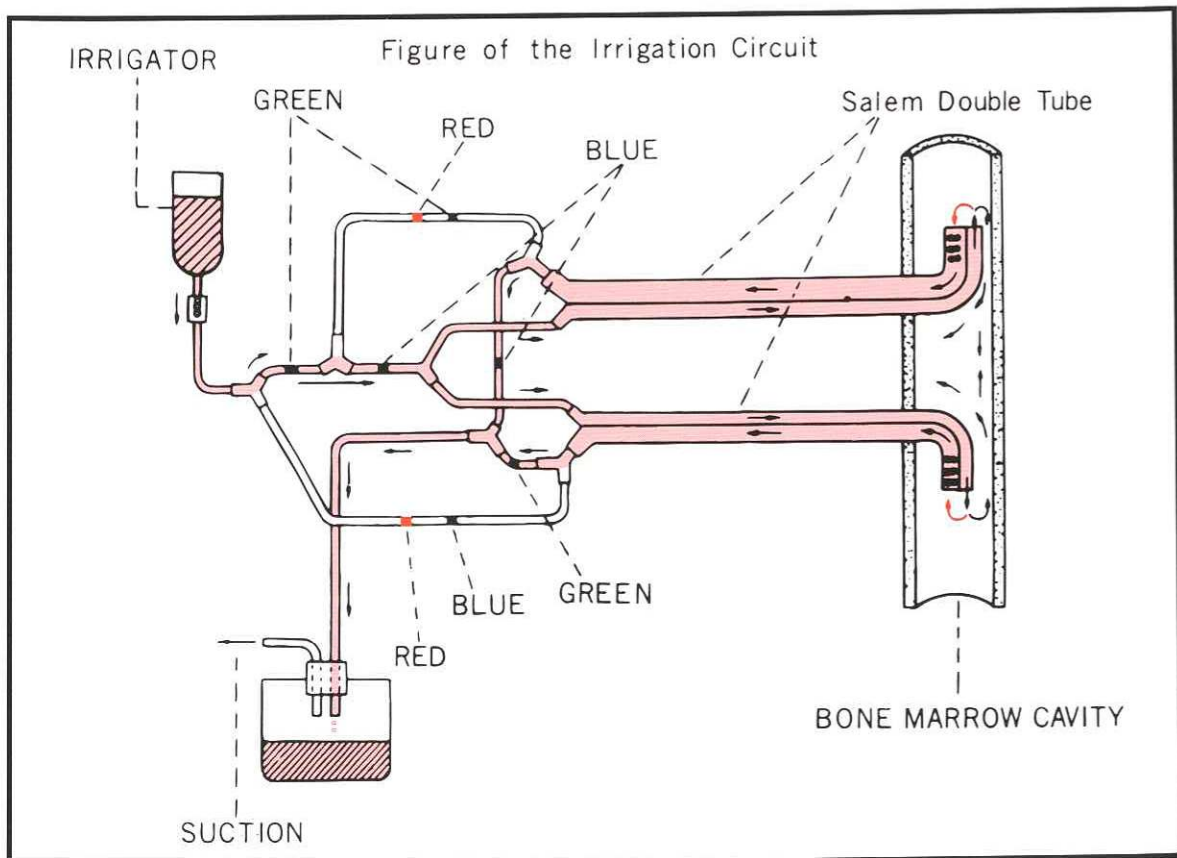

特 色

- 二重管チューブのため閉塞し難く、洗浄が持続的に施行できます。
- 閉塞時に三つの回路を切り変えることにより、容易に閉塞を解除できます。
- 腹膜ボタンにて、皮膚に固定しているため、水漏れが少なく、二次感染も予防され洗浄部位を、チューブを引き抜くことにより変更できます。
- X線不透過性です。

カタログ番号 0010・0012・0014・0016・0018

骨髓炎に対する閉鎖式持続洗浄療法

化膿性骨髓炎に対して局所持続洗浄療法は1) 再発率の低下、2) 治療期間の短縮の二点において画期的なものである。

本療法は、急性、慢性骨髓炎に適応があり、特に慢性の難治例にもきわめて有効な方法である。病巣の正確な把握と徹底的な搔爬・開削が本療法の基本であり、術後の持続洗浄はその上に成立しているものである。本療法は単なる抗生物質の注入ではなく、局所の持続的な洗浄とドレナージが生体の自然治癒力を促進し、死腔を埋め、新鮮な結合織に置換されていくことを応用しているのである。それゆえにチューブの閉塞は致命的で治療の失敗につながる

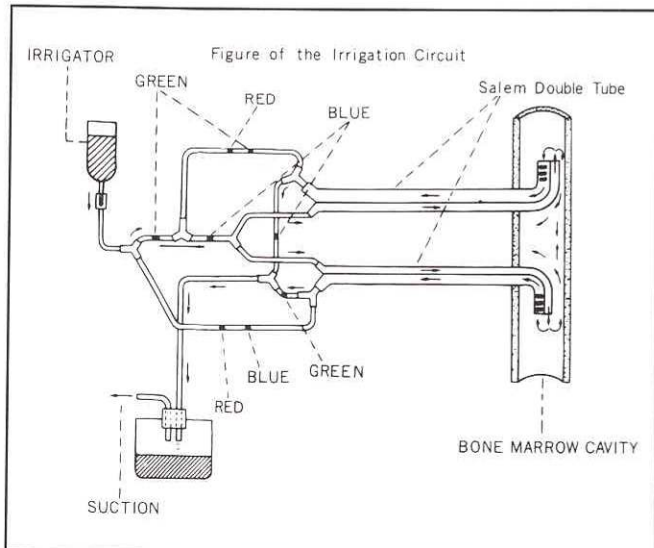


図1 閉塞防止回路

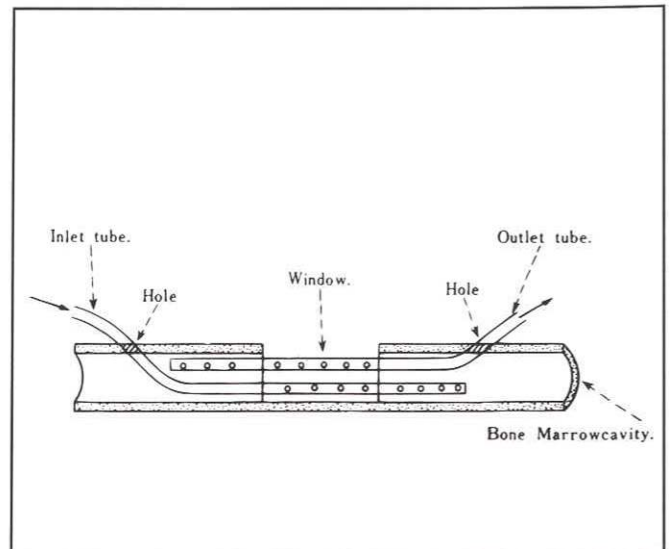


図2 骨髓内へのチューブの留置法

カタログ番号 0010・0012・0014・0016・0018

■総発売元 コーサンメディカル(有)

〒874-0910 大分県別府市石垣西10-9-27 TEL・FAX.0977-21-3398 ●各県に取次ぎ店あります。