

\*器具器械 30 結紮器及び縫合器 臍帯閉鎖術用クリップ

## 臍帯クリップ

### 再使用禁止

#### 【警告】

##### 使用方法

- ・結紮・切断の約30分から1時間後には、臍帯から出血のないことを確認して下さい。

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・臍帯の結紮以外の目的で使用しないこと。

#### 【形状・構造等】



- ・材質：66ナイロン

#### 【性能、使用目的、効能効果】

- ・新生児の臍帯止血クランプ

#### 【操作方法又は使用方法等】

1. 臍帯をクランプの中央に合わせます。
2. クランプのラッチがカチッと音がするまで押し込み、確実に結紮されていることを確認して下さい。
3. 結紮・切断の約30分から1時間後には臍帯から出血のないことを確認して下さい。

#### 【使用上の注意】

- ・臍帯はクランプの中央部で結紮してください。
- ・本品は1回限りの使用で、再滅菌・再使用はしないで下さい。
- ・包装が破損・汚損している場合や製品に異常が認められる場合は使用しないで下さい。
- ・包装を開封したら、直ちに使用して下さい。
- ・本品は医家向け製品です。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

##### 1. 貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて、常温で保管して下さい。

##### 2. 使用期限

滅菌後2年として使用期限を外箱に表示。

[自己認証による]

#### 【包装】

1箱50又は100個入り(個包装)

#### 【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

名称： 有限会社 滅菌センターミヤチ  
\*住所： 群馬県太田市新田小金井町 318-1  
電話： 0276-30-9030